

DUO-LINK UNIVERSAL™



DUO-LINK UNIVERSAL™

Popoln komplet za vašo ordinacijo



DUO-LINK UNIVERSAL podjetja BISCO

Adhezivni kompozitni cement je posebej zasnovan za cementiranje VSEH indirektnih restavracij. Na voljo je dveh barvnih odtenkih. Uporablja se z vsemi univerzalnimi adhezivi, vključno z vsemi adhezivi podjetja Bisco.



Univerzalno za vse postopke cementiranja

Indiciran za prevleke, mostičke (fiksna protetika), inleje, onleje in zatičke izdelane iz kovine, kompozita, porcelana, steklokeramike in cirkonija.



Izjemno enostavno čiščenje

Zasnovano za hitro in preprosto odstranjevanje odvečnega cementa



Visoka radioneupustnost

Preprosto prepoznavanje na radiogramih za hitro in učinkovito diagnozo



Visoka stopnja pretvorbe

Visoka stopnja pretvorbe pri svetlobnem in samodejnem strjevanju zagotavlja močno in dolgoročno restavracijo



Preprosta uporaba

Dvojna brizga za samodejno mešanje zagotavlja konsistentno mešanje za takojšnji nanos



Restavracije CAD/CAM


Idealen za vse restavracije, pripravljene v ordinaciji in laboratoriju



Dva odtenka

Univerzalni odtenek A2 je prosojen, odtenek Milky White pa je opačen in se lahko uporablja za prekrivanje temnejših delov zoba


Strižna trdnost vezave na dentin
Samostrejevanje (MPa)+

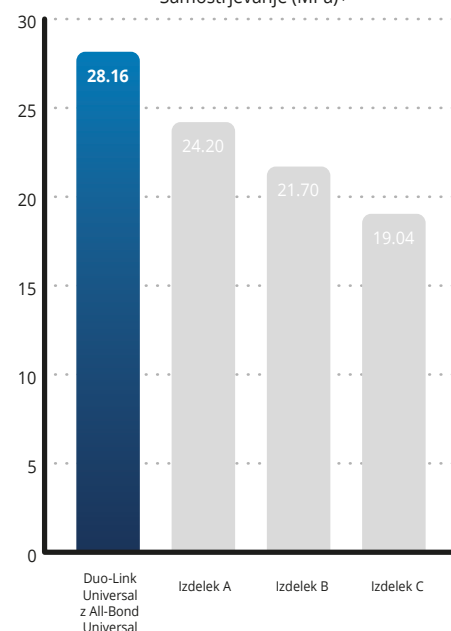

+ Vsi podatki se nanašajo na tehniko samojedkanja. Adhezivi so bili strjeni s svetlobno polimerizacijo v skladu z navodili posameznih proizvajalcev.

Strižna trdnost vezave pri uporabi metode Ultradent na dentinu.

Strižna trdnost vezave na dentin
pri popolnem samostrejevanju (MPa)+

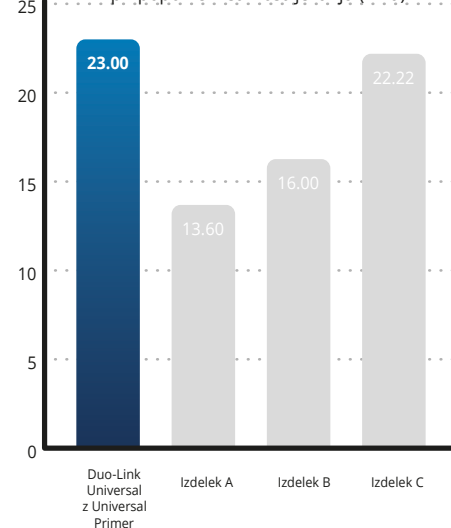

+ Vsi podatki se nanašajo na tehniko samojedkanja. V skladu z navodili proizvajalca je za popolno samostrejevanje potrebno samostrejevanje adheziva in cementa.

Strižna trdnost vezave pri uporabi metode Ultradent na dentinu.

† Za cementiranje lusk priporočamo CHOICE™ 2 podjetja BISCO.

KATERI KOMPLET JE PRAVI ZA VAS?

Duo-Link Universal Kit je sistem za adhezivno cementiranje. Kombinacija nagrajenih inovativnih izdelkov v preglednem in univerzalnem kompletu enostavnem za uporabo, zagotavlja visoko retencijo in vzdržljivost indirektnih substratov.



KOMPLET DUO-LINK UNIVERSAL Z ALL-BOND UNIVERSAL®		KOMPLET DUO-LINK UNIVERSAL Z UNIVERSAL PRIMER™
✓	DUO-LINK UNIVERSAL Ta adhezivni kompozitni cement je posebej zasnovan za cementiranje VSEH indirektnih restavracij.	✓
✓	PORCELAIN PRIMER Sredstvo za lepljenje s silanom za vse steklokeramične površine.	✓
✓	Z-PRIME™ PLUS Enokomponentni primer z MDP, za površine iz cirkonija in kovine.	✓
✓	ALL-BOND UNIVERSAL Resnično univerzalen svetlobno strjujoč adheziv v eni steklenički, ki vsebuje MDP.	✗
✗	UNIVERSAL PRIMER Dvojno strjujoč adheziv, ki vsebuje MDP.	✓

KAKO UPORABLJATI KOMPLET:

1

POSTOPEK DELA Z RESTAVRACIJO**

Steklokeramika/porcelan (na osnovi kremenca)
ali litijev disilikat/silikat




Nanesite Porcelain Primer

Po preskusu dekontaminirajte
notranjo površino

ALI

Kovina, cirkonij, aluminij, kompozit

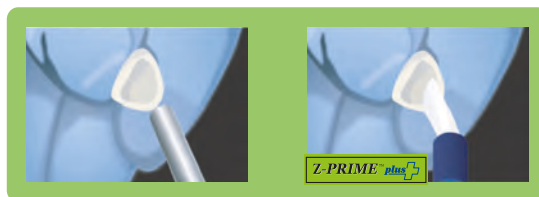

Po preskusu dekontaminirajte
notranjo površino

Nanesite Z-Prime Plus na
restavracijo

2

JEDKANJE



SAMOJEDKANJE: Temeljito izperite s pršenjem vode. Odstranite odvečno vodo (ne osušite)

ALI



TOTALNO JEDKANJE: Pripravite kaviteto. Temeljito izperite s pršenjem vode, nanesite sredstvo za jedkanje s fosforno kislino in temeljito sperite. Pripravljena površina mora biti vidno vlažna

ALI



SELEKTIVNO JEDKANJE: Če pripravite zajema sklenino. Pripravite kaviteto. Temeljito izperite s pršenjem vode. Sredstvo za jedkanje s fosforno kislino nanesite samo na sklenino in ga temeljito sperite. Pripravljena površina mora biti vidno vlažna

3

UPORABA ADHEZIVA

**ALL-BOND
UNIVERSAL®**



A. Nanesite All-Bond Universal



B. Posušite z zrakom



C. 10 sekund strujate s svetlobno polimerizacijo

ALI

**UNIVERSAL
PRIMER™**



A. Kanite enako število kapljic primerjev **Universal Primer Part A** in **B** (v razmerju 1 : 1) v čisto posodo za mešanje. S ščetko mešajte 5 sekund.



B. Nanesite Universal Primer



C. Posušite z zrakom

4

CEMENTIRANJE



A. Nanesite Duo-Link Universal na restavracijo



B. Namestite restavracijo



C. 2-3 sekunde strujate s svetlobno polimerizacijo in pred zadnjim strjevanjem odstranite odvečni cement

** Za podrobna navodila glejte celotna navodila za uporabo.

UNIVERZALNO
MOČAN.


UNIVERZALNO
PREPROST.

več
informacij



ŠTUDIJA PRIMERA

Z dovoljenjem Adama Notarantonia, DDS, AAACD, FICOI

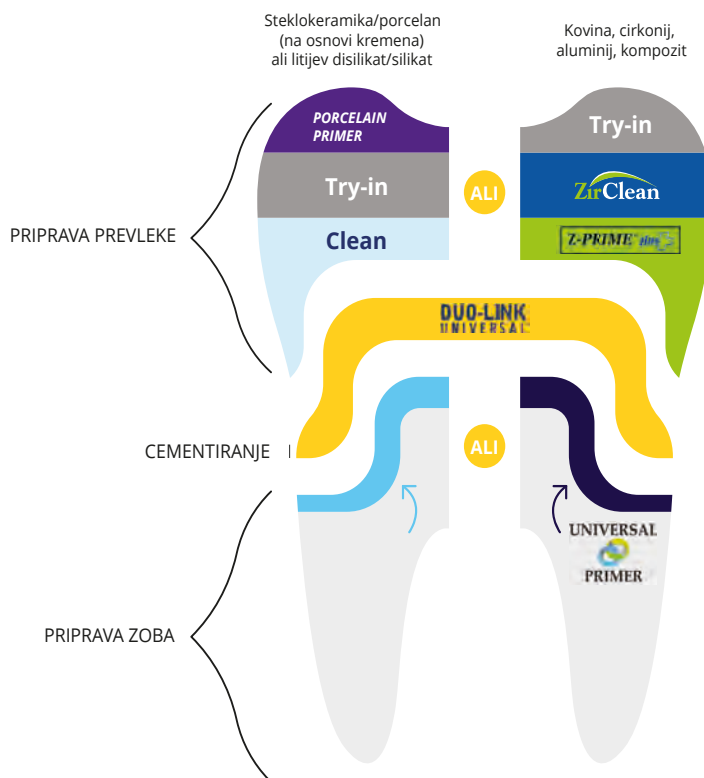

INFORMACIJE ZA NAROČILO

KOMPLET SISTEMA DUO-LINK UNIVERSAL..... **A-19620K**

1 dvojna brizga DUO-LINK UNIVERSAL Odtенок: UNIVERSAL (8 g), 1 steklenička ALL-BOND UNIVERSAL (6 ml), 1 steklenička Z-PRIME PLUS (2 ml), 1 steklenička primerja za porcelan (3 ml), dodatki, navodila

DUO-LINK UNIVERSAL Z UNIVERZALNIM PRIMERJEM..... **A-19710K**

1 dvojna brizga DUO-LINK UNIVERSAL Odtенок: UNIVERSAL (8 g), 1 steklenička UNIVERSAL PRIMER PART A (6 ml), 1 steklenička UNIVERSAL PRIMER PART B (6 ml), 1 steklenička Z-PRIME PLUS (2 ml), 1 steklenička PRIMERJA ZA PORCELAN(3 ml), dodatki, navodila

1 PAKET Z DVOJNO BRIZGO

1 dvojna brizga (8 g), 15 konic za mešanje in intraoralnih nastavkov, navodila

UNIVERSAL..... **A-19030P**

MILKY WHITE..... **A-197MWP**

ALL-BOND UNIVERSAL (6 ml steklenička)..... **B-7202P**

Komplet UNIVERSAL PRIMER PART A in B (6 ml/kos)..... **B-4110P**

Z-PRIME PLUS (2 ml steklenička)..... **B-6002P**

ZIRCLEAR® (5 g brizga)..... **B-7351P**